



## DES 70

# Ytdesinfektion för rena ytor

### Användningsområde

DES 70 är en flytande etanolbaserad ytdesinfektion. Alkoholhalten är 75 vol%. Den används i koncentrerad form för att effektivt förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning (bakterier, svamp, virus) via ytor.

pH 6-9.

Produkten lämpar sig för att desinficera rengjorda ytor.

### Produktfakta

Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och vissa virustyper. Den är testad och uppfyller de krav som föreligger i SS-EN 14885: 2018 för en ytdesinfektion med eller utan mekanisk bearbetning inom ett medicinskt verksamhetsområde.

EN 13624    Candida albicans  
                  Aspergillus brasiliensis

EN 13727    Pseudomonas aeruginosa  
                  Staphylococcus aureus  
                  Enterococcus hirae

EN 13697    Pseudomonas aeruginosa  
                  Staphylococcus aureus  
                  Enterococcus hirae  
                  Escherichia coli  
                  Candida albicans

Dessutom är produkten testad och uppfyller effekt mot virus enligt EN 14476:

EN 14476    Murin noro    rena betingelser

EN 16615 Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus  
Enterococcus hirae  
Candida albicans

EN 1276 Staphylococcus Aureus  
Enterococcus hirae  
Escherichia coli  
Pseudomonas aeruginosa

EN 1650 Candida Albicans  
Aspergillus Niger

**Art.nr**

17030001                                      Antal per kartong 12\* 1L      Flaska med sprutkapsyl

**Bruksanvisning**

Ytan som skall desinficeras skall först torkas av med en trasa och rengöringsmedel. Spruta sedan ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan, stryk noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Om ytan är mindre kan desinfektionsmedlet appliceras på torkduken. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden, minst 1min, generell verkningstid 1-5 minuter. Ytan ska lufttorka. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

**Hantering av produkt och emballage**

Förvaringstemperatur bör ligga mellan -20 och 30 grader.

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast".

**Innehåll**

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol,

**Lagring och hållbarhet**

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

